


NÁVOD NA SESTAVENÍ OCHRANNÉHO OBLIČEJOVÉHO ŠTÍTU GRD-1.0

videonávod zde



Komponenty v balení:

- 1x ochranný štít/překryt s ochrannou fólií
- 1x natahovací guma
- 1x stahovací plastový pásek

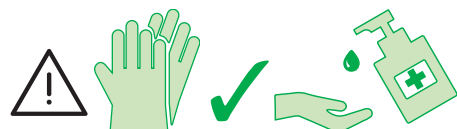


Při kompletaci použít ochranné rukavice nebo dezinfekci rukou! (Nejsou součástí dodávky.)




Vždy používejte se štítem i ochrannou roušku! (Není součástí dodávky.)


- 1 Stahovací pásek vsuňte do oválného otvoru zevnitř štítu a užším otvorem prostrčte zvenku až k zarážkám. Ty pásek zaaretují.

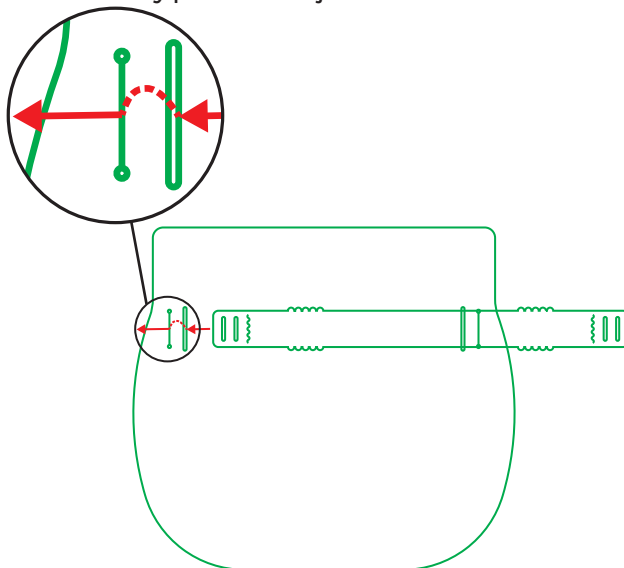


- 2 Postup zopakujte i na druhém konci pásku. Štít umožňuje použití i s brýlemi.

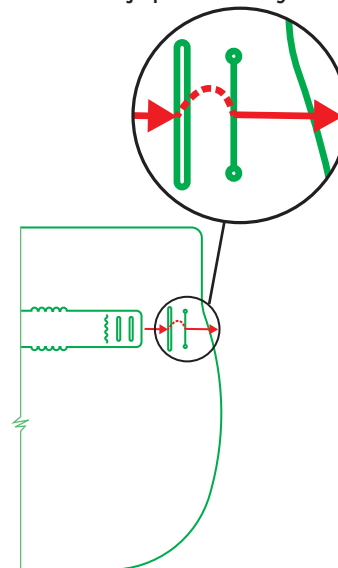

- 3 Po provlečení obou konců pásku se štít prohne do oblouku.

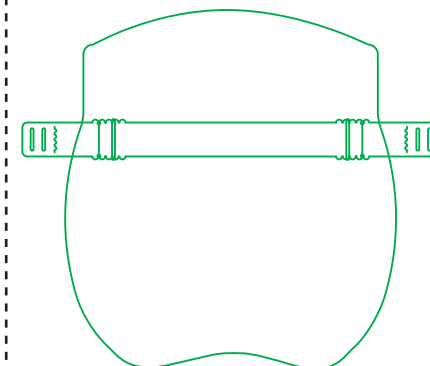


- 4 Do stahovacího pásku navlečte gumu: prvním otvorem (1) dovnitř, druhým otvorem (2) ven, třetím otvorem s vlnkami (3) opět dovnitř, nakonec se vraťte do prvního otvoru (1) a gumu vystrčte ven. Celý postup se zopakuje i pro druhý konec gumy.

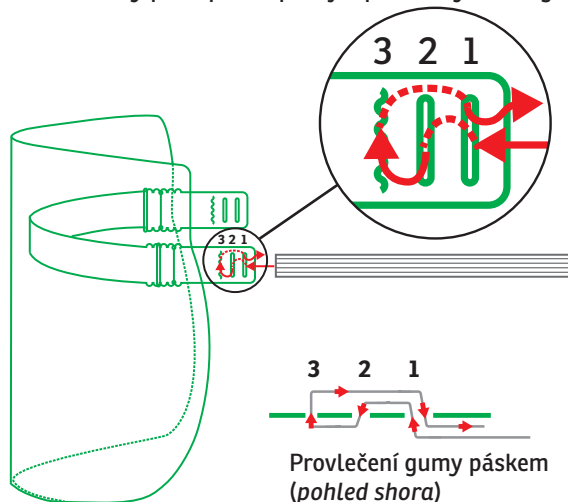

- 5 Štít zkuste nasadit na hlavu a gumu přitáhněte dle potřeby.

Teprve po správném nastavení strhneme ze štítu/překrytu ochrannou fólii z obou stran.

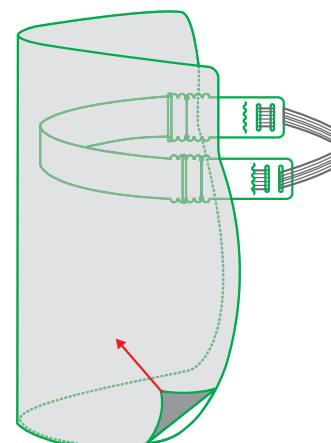

Vážení,
dostává se Vám do rukou **ochranný obličejový štít GRD-1.0** vyrobený sdružením agroup, které spojuje chráněnou dílnu Craftwork a společnosti GRD Servis, s.r.o. a Authentica, s.r.o. Tento dokument obsahuje informace o štítu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425. **Přílohou dokumentu je obrazový návod na sestavení štítu.**

1. Používání a údržba

Ochranný obličejový štít je primárně jednorázová ochranná pomůcka, která slouží jako improvizovaná ochrana obličeje proti kapénkám, jimiž se přenáší koronavirus. Ošetření je možné standardními čistícími prostředky (např. vlhčené ubrousky), jinak hrozí poškození plastového štítu.

2. Složení výrobku

Průhled štítu je vyrobený z netoxického materiálu PET G, tl. 0,5 mm.
Náhlavní držák je vyrobený z materiálu PP (polypropylen) tl. 0,8 mm, jeho povrch je příjemný, dobře přilne na čelo a můžete štít i odklopit.
Gumičku je možné stáhnout napevno podle velikosti hlavy.

3. Balení štítů

Ochranný štít je zabalený v polypropylenovém obalu v plochém stavu pro jednodušší a rychlejší logistiku. Takto zkompletovaný štít je finálně balen do expedičního obalu z vlnité lepenky, která plní především ochrannou funkci proti poškození.

4. Kategorie rizik osobních ochranných prostředků

Ochranný obličejový štít spadá do kategorie II Nařízení 2016/425. Primárně slouží k ochraně před proti kapénkám, kterými se přenáší koronavirus. Není sice utěsněný, v kombinaci s improvizovanou textilní rouškou však výrazně snižuje riziko přenosu viru.

Příloha: Obrazový návod na sestavení štítu.

5. Značení výrobku na nosné části

GRD – identifikace výrobce
1 – optická třída
S – symbol pro zvýšenou pevnost
3 – ochrana proti rozstříknutým kapkám a kapalinám
CE – evropská značka shody

6. Balení

Výrobek je skladován v PE uzavíratelném sáčku, zorník je chráněn fólií.

Varování

- materiály, které mohou přijít do kontaktu s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých jedinců příčinou alergických reakcí
- poškozený nebo poškrábaný výrobek musí být vyřazen

Název, adresa a identifikační číslo oznámeného subjektu, který byl zapojen do posuzování shody OOP:

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Oznámený subjekt 1023

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika

Internetová adresa, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě:

www.grdservis.cz



www.zbrojhrdinu.cz

Pro snazší
skládání štítu
naskenujte QR kód
a postupujte podle
videonávodu.

